

## Lista programmi **SALUTE – REHAB** (trattamenti medicali)

In conformità alle nuove disposizioni del Ministero della Salute, i programmi di tipo medicale sono solo quelli riportati nel presente elenco

Nome Trattamento	Potenza consigliata	Durata consigliata
Fratture	50 Gauss	Da 1 a 3 h*
Cuffie Rotatori	30 Gauss	Da 1 a 3 h*
Tunnel Carpale	3 Gauss	Da 1 a 3 h*
Osteoartrite Ginocchio	25 Gauss	Da 1 a 3 h*
Osteoartrite Cervicale	15 Gauss	Da 1 a 3 h*
Dolore Schiena	15 Gauss	Da 20' a 45'*
Protesi Anca	50 Gauss	Da 1 a 3 h*
Ritardo Consolidamento Fratture	30 Gauss	Da 4 a 12 h*
Osteoporosi	30 Gauss	Da 1 a 3 h*
Frattura Scafoide	30 Gauss	Da 4 a 10 h*
Frattura Polso	100 Gauss	Da 10' a 30'*
Fratture Spalla	30 Gauss	Da 3 a 8 h*
Fratture Clavicola	30 Gauss	Da 3 a 8 h*
Fratture Avambraccio	30 Gauss	Da 3 a 8 h*
Fratture Bacino	30 Gauss	Da 3 a 8 h*
Fratture Tibia	30 Gauss	Da 3 a 8 h*
Post Intervento LCA	15 Gauss	Da 1 a 4 h*
Pulizia Cartilagine	15 Gauss	Da 2 a 6 h*
Protesi Ginocchio	15 Gauss	Da 1 a 4 h*
Frattura collo femore	30 Gauss	Da 3 a 8 h*
Epitrocleite	60 Gauss	Da 10' a 30'*
Artrosi	20 Gauss	Da 10' a 30'*
Osteoartrite Mano	20 Gauss	Da 10' a 30'*
Osteoartrite Anca	20 Gauss	Da 10' a 30'*
Osteoartrite Spalla	20 Gauss	Da 10' a 30'*
Osteoartrite Colonna	20 Gauss	Da 10' a 30'*
Epicondilite	60 Gauss	Da 10' a 30'*
Tendiniti	30 Gauss	Da 1 h a 2h*
Edemi - Contusioni	20 Gauss	10' 2-3 volte di*
Dolori articolari	100 Gauss	Da 15' a 40'*
Distorsione caviglia	2 Gauss	30'*
Artriti	20 Gauss	Da 20' a 30'*

\* o come da prescrizione medica

I dati riportati nella colonna Gauss e Trattamento sono tratti dalla letteratura scientifica e sono stati sottoposti a valutazione clinica come da direttiva Europea sui dispositivi medici. Verificare sempre con il proprio medico specialista in caso di dosaggi differenti (in base alla condizione cliniche specifiche del soggetto).

*Per la presenza di programmi di tipo clinico, l'apparecchio è un dispositivo medico. Pertanto è*

## LISTA PROGRAMMI

Lista programmi **ESTETICA – FITNESS** (trattamenti non medicali)

X = Programma presente nell'apparecchio

Nome Trattamento	Potenza Consigliata	Durata Consigliata
Drenaggio Addome	40 Gauss	30'
Drenaggio Arti Superiori	40 Gauss	30'
Drenag. Cosce Glutei e Fianchi	40 Gauss	45'
Cellulite Addome	30-50 Gauss	45'
Cellulite Arti Superiori	30-50 Gauss	45'
Cellulite Cosce Glutei e Fianchi	30-50 Gauss	45'
Stati Edematosi	40-60 Gauss	30'
Gonfiore Gambe	50 Gauss	30'
Trattamento Riattivante	50 Gauss	30'
Rigenerazione Tessutale	40-60 Gauss	45'
Acne	20-30 Gauss	30'
Cicatrici	20-30 Gauss	30'
Rughe Facciali	20-30 Gauss	30'
Smagliature	30-50 Gauss	30'

Il CE0476 non si riferisce ai trattamenti non di tipo medicale